

12. NENIČTE. Nepoužívejte baterii, přístroj nebo nabíječku, která byla vystavena prudkému úderu, přejetí vozem, spadla nebo byla jinak poškozena.

13. CHEMIKÁLIE Z BATERIÍ ZPŮSOBUJÍ VÁŽNÉ POPÁLENINY. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou, očima nebo ústy. Pokud z poškozené baterie vytékají chemikálie, použijte k manipulaci gumové nebo neoprenové rukavice. Pokud je pokožka vystavená tekutinám z baterie, umyjte ji mýdlem a vodou a opláchněte octem. Pokud dojde ke kontaktu s očima, okamžitě je začněte vyplachovat tekoucí vodou minimálně 20 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv odstraňte a zlikvidujte.

14. NEZKRATUJTE BATERII. Baterie zkratuje, pokud kovový předmět spojí při kontaktu s baterií kladný a záporný pól. Neumísťujte baterii v blízkosti objektů, které by mohly způsobit zkrat (mince, klíče, hřebíky). Zkratovaná baterie může způsobit zranění a požár.

15. NEPOUŽÍVEJTE POD PŘÍKRÝVKOU. Při použití může dojít k nadměrnému zahřátí a nebezpečí vzniku požáru, poranění elektrickým proudem a jiného zranění.

16. USKLADNĚNÍ. Skladujte na chladném, suchém místě při teplotě 0–40°C. Neskladujte přístroj ani baterii tam, kde mohou teploty překročit 40°C – na přímém slunci, v autě, v železných budovách a prostorech během léta. Pokud není přístroj používán delší dobu, baterie by z něj měla být vyjmuta.

17. LIKVIDACE BATERIÍ. Li-ion baterie jsou šetrnější k životnímu prostředí než jiné typy baterií. Baterii vždy likvidujte podle platných předpisů a regulací Ministerstva životního prostředí a na místech k tomu určených. I vybité baterie obsahují určité množství energie. Před likvidací zalepte kontakty / konektor elektrickou izolační páskou, abyste zamezili zkratu baterie, který by mohl způsobit výbuch nebo požár.

18. NEROZEBÍREJTE. Demontáž a nesprávné opětovné sestavení mohou vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru nebo vystavením nebezpečných chemikálií z baterií. Záruka je neplatná, pokud byl přístroj nebo jeho nabíječka rozmontován nebo z něj byly odstraněny nějaké součástky. Pokud je přístroj nebo nabíječka poškozena, kontaktujte společnost Theragun či Rehasport Trade s.r.o.

19. SERVIS. Pokud přístroj Theragun PRO, baterie nebo nabíječka nefungují správně, pokud došlo k ostrému nárazu nebo pádu, poškození, ponechání v exteriéru nebo pádu do vody, přístroj a příslušenství nepoužívejte a kontaktujte společnost Rehasport Trade s.r.o. zasláním emailu na info@rehasport.cz ohledně opravy nebo servisu. Nepokoušejte se přístroj sami opravit nebo demontovat, riziko elektrického výboje a požáru.

20. NEPOUŽÍVEJTE PŘI KOUPÁNÍ, VE SPRŠE, VANĚ ČI UMYVADLE. Nepokládejte a neuskładňujte Theragun na místech na dosah vany nebo umyvadla. Nepokládajte do vody, nenechte spadnout do vody či jiné tekutiny. Nesahejte na příslušenství, které spadlo do vody, okamžitě odpojte zdroj elektrického proudu.

21. TEPLOTNÍ POJISTKA. Zabudovaná automatická teplotní pojistka předchází přehřátí a riziku vzniku požáru.

22. POLARIZOVANÁ ZÁSTRČKA. Lze zapojit pouze jedním směrem – snižuje riziko vzniku elektrického výboje.

23. NEPOUŽÍVEJTE V PŘÍTOMNOSTI používání aerosolových sprejů nebo na místech se zvýšenou koncentrací kyslíku.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Theragun PRO má záruku 2 roky. Záruka se nevztahuje na poškození, za které se považují i opravy provedené jinou osobou než oprávněným pracovníkem společnosti Theragun. Záruka se nevztahuje na nesprávné použití, změny, nevhodné použití, běžné opotřebení, nedostatečnou údržbu a nehody způsobené pádem a podobně. Podrobné informace o záruce najdete na www.theragun.com/warranty. V případě záležitostí týkajících se záruky nás kontaktujte e-mailem na info@rehasport.cz.

THERAGUN

PRO

NÁVOD NA POUŽITÍ



Výrobce: Theragun, LLC, USA

Rázová terapie, masážní přístroj

Kód produktu: PRO-PKG-EU

Balení obsahuje:

Theragun PRO, cestovní kufřík, pouzdro se 6 nastavci, 2 Li-ion baterie, nabíječku

ULOŽTE SI TYTO POKYNY PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ

Pro více informací o Theragunu navštivte: www.rehasport.cz/theragun.

Pro více informací o praktickém využití si stáhněte **Therabody App** na App Store či Google Play nebo shlédněte video návody na: <https://www.rehasport.cz/videonavody-theragun/>.

Pokud pro vás tyto informace nejsou dostačující nebo byste se chtěli dozvědět více, můžete navštívit vzdělávací kurz „**Terapeutické využití Theragunu**“. Termíny kurzů sledujte na: www.rehasport.cz/theragun-kurz.

Distributor: REHASPORT TRADE s.r.o.
www.rehasport.cz, tel: 800 200 900



Theragun PRO je profesionální Smart přístroj na perkusivní terapii. Jediný ve své kategorii. Je to nejvýkonnější komerční přístroj na trhu, nyní ještě osobitější díky intuitivní průvodcovské aplikaci Therabody, která komunikuje s Vaším přístrojem prostřednictvím Bluetooth a kromě přednastavených procedur máte možnost si do přístroje uložit i vlastní preferované procedury ošetření. Therabody Vám pomoci dat o Vaší aktivitě dává doporučení a je Vaším průvodcem při použití přístroje. Amplituda 16 mm dosahuje o 60% hlouběji do svalu než obyčejný vibrační masážní přístroj. Tím stimuluje cirkulaci krve, generuje teplo a uvolňuje svalové napětí. Theragun PRO poskytuje ošetření bezkonkurenčního výkonu, renomované síly a zároveň je tišší než kdykoliv předtím díky patentovanému motoru s technologií QuietForce™. Životnost baterie byla navýšena na 150 minut. Nová je i funkce pěti rychlostních režimů, která umožňuje volbu 1750, 1900, 2100, 2200 a 2400 otáček za minutu. S použitím aplikace můžete zvolit libovolnou rychlost v rozmezí od 1750 ot./min. až do 2400 ot./min. Přístroj přichází se šesti jedinečnými nástavci, které lékaři vyvinuli pro specifické potřeby různých částí těla a způsobu ošetření.

Specifikace

- Patentovaný bezkartáčový průmyslový motor s technologií QuietForce™
- Smart perkusivní terapie s Bluetooth připojením
- 3 přednastavené procedury s průvodcem v aplikaci
- OLED displej
- Force metr – ukazatel tlakové síly
- Možnost bezdrátového nabíjení
- Patentovaná ergonomická rukojeť ve tvaru trojúhelníku
- Upravitelná poloha ramene: 4 pozice
- Upravitelné rozmezí rychlosti : 1750 – 2400 perkusí za minutu
- Působí silou: 27 kg
- Amplituda: 16 mm
- Hmotnost: 1,3 kg
- Rozměry: 25,5 cm x 18,0 cm x 7,6 cm
- Počet baterií: 2 baterie – každá s výdrží 150 minut a kapacitou 2,5 Ah
- Doba nabíjení: 75 minut
- Záruka: 2 roky



- Dostupný doplňkový sortiment: PRO bezdrátový nabíjecí stojan, Multi-přístrojová bezdrátová nabíječka, Cestovní adaptér

Výhody a využití:

- podporuje celkový rozsah pohybu bez bolesti
- podporuje lepší držení a vnímání těla
- zlepšuje svalovou koordinaci a mobilitu uvolňováním spouštěvých bodů
- uvolňuje bolestivé a zatuhlé svaly, zbavuje tělo ztuhlosti např. při cestování
- uvolňuje svalové křeče, což pomůže svalům doplnit novou energii a lépe se hydratovat
- zrychluje zahřátí svalů před tréninkem, po tréninku napomáhá rychlejší regeneraci
- nahrazuje protahování v každodenní rutině
- regenerace celého těla během 15 minut
- s přístrojem dosáhnete až na 90% svého těla díky otočnému rameni a ergonomické trojúhelníkové rukojeti

VAROVÁNÍ

Během používání a po použití přístroje Theragun PRO nedávejte prst ani žádné jiné předměty do blízkosti kovového pistu nad masážním nástavcem. Nepoužívejte přístroj PRO přes ohryzek nebo krční obratel C4. Nepoužívejte přístroj PRO na hlavě nebo v blízkosti Vašich genitálií. Nepoužívejte na oblast břicha a pasu u těhotných žen. Dávejte pozor na zamotání vlasů do držáku nástavce nebo jiných pohyblivých částí přístroje. Nenamáčejte přístroj PRO, čistěte jej čistící houbičkou nebo lehce navlhčeným hadříkem. Neblokujte větrací otvory motoru. Tento produkt není určen k odborné diagnóze, léčbě ani prevenci onemocnění. Nepoužívejte žádné jiné masážní nástavce, jiné baterie ani jiné nabíječky, než ty, které jsou přímo určené pro přístroj Theragun PRO. Jiné příslušenství může trvale poškodit přístroj.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE THERAGUN PRO NEBO NABITÍM LITHIUM-IONTOVÉ BATERIE SI, PROSÍM, PŘEČTĚTE, všechny návody a bezpečnostní pokyny v tomto manuálu, na nabíječe, na baterii a na přístroji PRO.

NOVÉ BATERIE MUSÍ BÝT NABITY PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:

Theragun PRO je určen ke komerčnímu i domácímu použití. Usilujeme o to, aby přístroj Theragun PRO byl co nejbezpečnější. Jedná se však o moderní mechanický přístroj s elektrickými součástkami. Pokud není přístroj a jeho příslušenství správně používán a udržován, hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Při používání přístroje Theragun PRO je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, a to:

1. POUŽÍVEJTE PODLE NÁVODU. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto provozním manuálu. Používejte Theragun pouze s doporučeným příslušenstvím a náhradními díly. Neprovádějte žádnou údržbu, která není uvedena v tomto provozním manuálu nebo stanovená společností Theragun.

2. NEVHODNÉ PRO DĚTI. Přístroj Theragun PRO ani jeho příslušenství nejsou určeny pro použití malými dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud není jeho používání pod vedením a dohledem odpovědné osoby, která zajistí bezpečné nabíjení a používání přístroje. Nedovolte, aby byl Theragun používán jako hračka. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud přístroj používáte v přítomnosti dětí, nebo když jej děti používají. Děti by měly být pod dohledem, abyste se ujistili, že si nebudou s Theragunem, bateriemi nebo nabíječkou hrát.

3. NIKDY NEVYNDÁVEJTE BATERII, POKUD JE PŘÍSTROJ V PROVOZU!

4. UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO PORANĚNÍ, NABÍJEJTE POUZE NABÍJEČKOU URČENOU THERAGUN PRO. Jiné typy a značky nabíječek mohou způsobit zranění nebo poškození. Nedávejte baterii do napájecí zástrčky či zapalovače cigaret v autě. Baterie se tím mohou trvale poškodit nebo zničit. K bezdrátovému nabíjení používejte pouze nabíječku určenou pro přístroj Theragun PRO.

5. POUŽÍVEJTE POUZE S BATERIEMI THERAGUN PRO. Použití s jinými bateriemi může vést k nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiné zranění.

6. NABÍJECÍ MÍSTO. Theragun by měl být nabíjen pod střešou a v dobře větraném a suchém prostředí. Nenabíjejte venku, v koupelně nebo do vzdálenosti 3 m od vany, umyvadla nebo bazénu. Nepoužívejte přístroj nebo nabíječku na mokrému povrchu a nevystavujte je vlhkosti, dešti ani sněhu. Nepoužívejte baterii ani nabíječku v přítomnosti výbušných složek (při použití by mohly vzniknout jiskry, zvýšené riziko požáru).

7. NABÍJENÍ. Nevytahujte nabíječku ze zásuvky za kabel. Nepřenášejte nabíječku za kabel. Chraňte kabel před teplem, olejem a ostrými hranami. Nepoužívejte nabíječku, pokud je kabel poškozen. Poškozenou nabíječku okamžitě vyměňte. Neroztahujte kabel a nevystavujte jej tlaku. Umístujte kabel mimo vyhřívané plochy. Nemanipulujte s nabíječkou, její koncovkou nebo přístrojem pokud máte vlhké ruce.

8. ODPOJTE NABÍJEČKU. Pokud nabíječku právě nepoužíváte, vyjměte baterie a odpojte ze zásuvky. Ujistěte se, že je kabel nabíječky umístěn tak, aby nebyl vystaven poškození nebo tlaku.

9. NEPŘEBÍJEJTE BATERII. Nenechávejte baterii v nabíječce déle než hodinu po úplném nabití. Přebíjení zkracuje životnost baterie.

10. NEBLOKUJTE VĚTRACÍ OTVORY MOTORU. Nevkládejte nic do větracích otvorů a nepřikrývejte, umožněte volné proudění vzduchu. Chraňte před prachem, bavlněnými vlákny, vlasy nebo čímkoliv, co může snížit proudění vzduchu. Udržujte vlasy, volné oblečení a prsty z dosahu větracích otvorů a pohyblivých částí.

11. NIKDY NEZAPALUJTE BATERII. Baterie může explodovat a způsobit vážná zranění. Při spálení vznikají toxické výpary a plyny.