

# THERAGUN mini

## Návod k použití

### Začínáme

#### Krok 1

#### Zapnutí

Chcete-li Theragun mini zapnout, pevně stiskněte a podržte multifunkční napájení/ rychlostní tlačítko na boku zařízení, poté použijte Theragun mini přes oblasti, které potřebujete ošetřit. Podle potřeby použijte lehký až mírný tlak.

#### Krok 2


#### Stáhněte si aplikaci Therabody

Provedeme vás nastavením bez stresu a ukážeme vám, jak z toho vytěžit maximum.

#### Krok 3

#### Pociťte ten rozdíl.™ Každý den.

Zhluboka se nadechněte a dopřejte si vedené léčebné předvolby nebo Freestyle režim. To vše je navrženo pro vás.

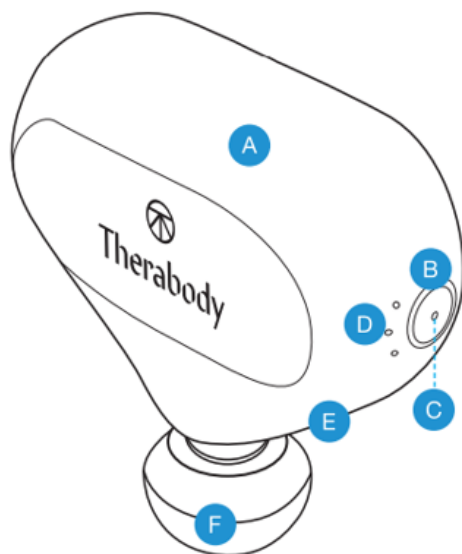


- A Ergonomická rukojeť
- B Multifunkční napájení/ tlačítko rychlosti
- C LED kontrolka baterie
- D LED indikátor rychlosti
- E Nabíjecí port USB-C
- F Zaměnitelné

## Použití Theragun mini

1. Chcete-li zapnout Theragun mini, pevně stiskněte a podržte multifunkční zařízení tlačítko napájení/rychlosti na pravé straně zařízení.
2. Pohybujte přístrojem po oblastech, které potřebují ošetření, a postupně na ně aplikujte mírný tlak podle potřeby.
3. Dalším stisknutím tlačítka napájení/rychlosti můžete přepínat mezi 3 rychlostmi.
4. Chcete-li Theragun mini vypnout, pevně stiskněte a podržte tlačítko napájení/rychlosti dokud se zařízení nevypne.

## Připojování nástavců

1. Zarovnejte nástavec se špičkou a zatlačením připojte. Pro odstranění uchopte nástavec, na každou stranu položte 1 prst.
2. Odstraňte nástavec.

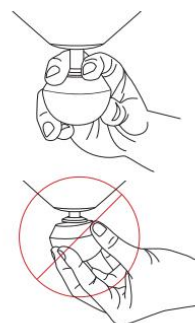





## Nabíjení Theragun mini

1. Theragun mini podporuje USB-C. Pro nabíjení, po vypnutí zařízení, zapojte jeden konec kabelu, který je součástí balení, do USB zařízení a druhý konec do zařízení.
2. Kontrolka LED na tlačítku napájení/rychlosti bude blikat až do úplného nabití.
3. Nabíjení je dokončeno, když se rozsvítí kontrolka LED na tlačítku napájení/rychlosti sytě zelená.
4. Úroveň baterie se nepřetržitě zobrazuje na LED kontrolce napájení/rychlosti tlačítko, když je zařízení zapnuté.
5. Chcete-li zobrazit úroveň nabití baterie, když je zařízení vypnuté, krátce stiskněte tlačítko napájení/rychlost a LED kontrolka baterie bude blikat, aby indikovala úroveň baterie.

## Úroveň baterie

Úroveň baterie Theragun mini je indikován následujícími barvami:

-  Blikající oranžová: Nízké nabití
-  Blikající modrá: Nabito do poloviny
-  Blikající zelená: Vysoké nabití
-  Svítící zelená: Plně nabito

## Čištění Theragun mini

Pro co nejhygieničtější zážitek zařízení Theragun mini dezinfikujte po každém použití:

1. Otřete zařízení dezinfekčním hadříkem, abyste odstranili veškeré zbytky.
2. Jakmile je zařízení beze zbytků, dezinfikujte povrch pomocí nového hadříku otírejte všechny strany pohybem dolů.

## Chytré funkce

Váš Theragun mini je chytré zařízení s připojením Bluetooth pro bezproblémové spárování s aplikací Therabody. Když si stáhnete aplikaci, provedeme vás nastavením krok za krokem a ukáže vám, jak spárovat vaše zařízení. Po spárování s vaším zařízením může aplikace na dálku upravovat rychlost a aktivovat s průvodcem předvolby léčby a vytvoří doporučení v reálném čase na základě vašeho použití.

[Naskenujte QR kód](#)



## Příslušenství

Váš Theragun mini je dodáván se 3 nástavci navrženými pro lepší přizpůsobení léčby.

- Vyrobeno z pohodlné PU pěny s uzavřenými buňkami
- Snadno se čistí
- Neabsorbují pot, tělové mléka ani oleje

**Cílenější možnost pro celkové použití.** Standardní nástavec je speciálně navržen pro celkové použití na velké i malé svalové skupiny.



Standard Ball

**Pro citlivé oblasti a celkové použití.** Nástavec Dampener je speciálně navržen pro všeobecné použití a ošetření s nízkým dopadem kolem citlivých oblastí.



Dampener

Jeho široká základna maximalizuje povrch pro větší a efektivnější kontakt s tělem.

**Pro spouštěvé body a spodní část zad.** Speciálně navržený tak, aby napodoboval skutečný lidský palec.



Thumb