


Theragun mini

Přečtěte si přiložené bezpečnostní instrukce.

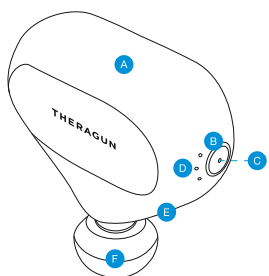

- A Ergonomická rukojeť
- B Multifunkční tlačítko
- C LED kontrolka baterie
- D LED kontrolka rychlosti
- E Port k připojení nabíječky
- F Vyměnitelný nástavec

Použití Theragunu mini

1. Silným stisknutím a přidržením multifunkčního tlačítka na pravé straně zapnete přístroj Theragun mini.
2. Nechte přístroj plout po oblastech, které vyžadují nejvyšší pozornost. Podle potřeby přidávejte nebo ubírejte tlak.
3. Opětovným stisknutím multifunkčního tlačítka přepínejte mezi 3 rychlostmi ošetření.
4. Přístroj vypnete silným stisknutím a podržením multifunkčního tlačítka. Tlačítko držte stlačené dokud se Theragun mini nevypne.

Nasazení a sundání nástavců

Nasměrujte nástavec k zakončení ramene, otočte nástavec tak, aby tvar koncovky ramene korespondoval s tvarem prohlubně v nástavci. Nasadte zatlačením, díly do sebe zacvaknou.

Nástavec sundáte uchopením plastové objímky nástavce a vytáhnutím.

Váš Theragun mini přichází s nástavcem Standard Ball, který je vytvořený k univerzálnímu použití.

Theragun mini je kompatibilní s PRO nástavci 3. generace a se všemi nástavci 4. generace.

Nabíjení Theragunu mini

1. Vypněte přístroj Theragun mini a připojte nabíječku.
2. LED kontrolka baterie začne blikat dokud baterie nebude úplně nabita.
3. Nabíjení je dokončeno, když svítí LED kontrolka baterie zeleně a bez přerušení.
4. Zapnutý přístroj zobrazuje stav baterie pomocí LED kontrolky. Pro zobrazení stavu baterie vypnutého přístroje stačí lehce stisknout tlačítko a kontrolka baterie se rozsvítí.

Stav baterie

Stav baterie Theragunu mini je zobrazován následovně:

- **Blikající červená:** Slabá baterie
- **Blikající modrá:** Polovina baterie
- **Blikající zelená:** Nabito
- **Nepřerušovaná zelená:** Plně nabito