

## Začínáme

### Krok 1

#### Zapněte a nechte pracovat

Nechte G3PRO plout po svalech, které si vyžadují nejvyšší pozornost a úlevu od bolesti.

### Krok 2

#### Stáhněte si aplikaci Theragun

Zjistěte jak dostat z vaší G3PRO co nejvíce pomoci návodů a triků krok za krokem.


### Krok 3

#### Žijte svůj nejlepší život

Zlepšete své zdraví, pohyblivost a štěstí, zasloužíte si to.



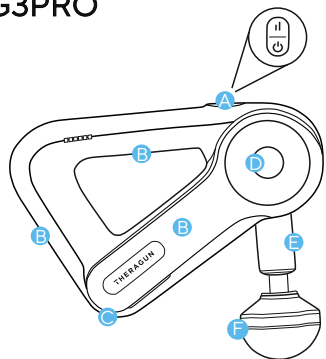


## G3PRO



Přečtěte si přiložené bezpečnostní instrukce

- A Vypínač | přepínač rychlosti
- B Multi-úchopová rukojeť
- C Dobíjecí Li-ion baterie
- D Tlačítko pro odjištění polohy ramene
- E Polohovatelné rameno přístroje
- F Vyměnitelný nástavec


## Použití G3PRO

1. Před zapnutím vložte do G3PRO baterii.
2. Stisknutím tlačítka  zapnete G3PRO.
3. Stisknutím tlačítka  přepínejte rychlosti (2400 ot./min. pro standardní ošetření a 1750 ot./min. pro jemnější ošetření).
4. Opětovným stisknutím tlačítka  vypnete přístroj G3PRO.

**Stáhněte si Theragun App pro více informací o praktickém použití G3PRO.**


## Nasazení a sundání nástavce

1. Nasměrujte nástavec k zakončení ramene, otočte nástavec tak, aby korespondoval tvar koncovky ramene s tvarem prohlubně v nástavci, nasadte zatlačením, díly do sebe zacvaknou.
2. Sundání nástavce - uchopte spodní část nástavce a vytáhněte.

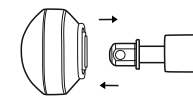


## Použití polohovatelného ramene

1. Upravte polohu ramene do jedné ze 4 pozic.
2. Rameno uvolníte stisknutím a držením tlačítka z boku horní části.
3. Puštěním tlačítka se daná poloha zafixuje.

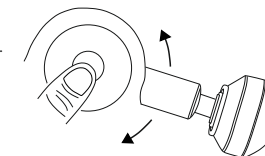

## Vkládání a vyjmutí baterií

1. Připravte si baterii plochou částí směrem k tlačítku.
2. LED kontrolky signalizují stav baterie, při zapnutí přístroje se rozsvítí.
3. Pro vyjmutí odjistěte posuvné tlačítko a vysuňte baterii.

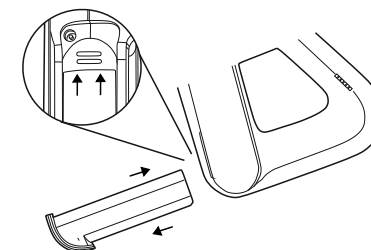

## Nabíječka

Vložte baterii do nabíjecí stanice a zatlačte. Signalizace na nabíjecí stanici se začne rozsvěcet a zhasínat ("dýchat"). Baterie je nabitá když signalizace na nabíjecí stanici svítí bez přerušení.

## Nástavce

Váš G3PRO přichází s 6 nástavci - každý je speciálně navržený na jiné svalové skupiny, zaměřen na různé zdravotní neduhy a bolesti.

**Zjistěte jak je všechny použít pomocí Theragun App.**

