



AERIFY ALPHAS

Uživatelská příručka



Obsah

1. Bezpečnostní opatření
2. Přehled produktu
3. Začínáme
4. Návod k obsluze
5. Údržba a péče
6. Řešení problémů
7. Technické specifikace a
záruka
8. Kontaktní údaje

1. Bezpečnostní opatření:

- Před použitím regeneračních návleků si pečlivě přečtěte uživatelský manuál.
- Návleky Aerify Alpha jsou určeny pouze pro dospělé. Uchovávejte je mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pokud trpíte nějakým zdravotním problémem nebo máte obavy, před použitím tohoto produktu se poraďte s lékařem.
- Regenerační boty nepoužívejte, pokud máte otevřené rány, kožní infekce nebo jiné kožní problémy.
- Nepoužívejte regenerační boty, pokud jste těhotná nebo trpíte poruchami krevního oběhu, hlubokou žilní trombózou (DVT) nebo jinými závažnými zdravotními problémy, pokud to výslovně neschválí lékař.
- Regenerační boty ani napájecí jednotku nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
- Regenerační boty nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla ani při extrémních teplotách.
- Pokud při používání regeneračních bot pocítíte nepohodlí nebo bolest, okamžitě je přestaňte používat a poraďte se s lékařem.

2. Přehled produktu:

Aerify Alphas Recovery Boots jsou pneumatický kompresní systém navržený tak, aby pomáhal zlepšovat regeneraci zlepšením krevního oběhu, snížením bolesti svalů a zmírněním únavy. Balení obsahuje následující komponenty:

- Dva návleky na nohy s 5 vzduchovými komorami.
- Jednoduchá ovládací jednotka připojená ke každé botě s uživatelsky přívětivým rozhraním.
- 4 x dobíjecí baterie.
- Napájecí kabely C-USB pro nabíjení baterií.
- Skladovací tašky pro bezpečné uložení bot.
- Sportovní taška pro přenášení celého systému nebo pro použití jako běžná taška do posilovny.
- Uživatelská příručka (právě ji čtete!)

3. Začínáme:

- Opatrně vybalte všechny součásti z krabice a zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
- Připojte baterie ke každé řídicí jednotce, která je připevněna k botě. Nepokoušejte se řídicí jednotku z boty vyjmout.
- Nasad'te si návleky na nohy a ujistěte se, že vám pohodlně sedí. Upravte je tak, aby dobře přiléhaly, ale nebyly příliš těsné.
- Ujistěte se, že jsou baterie plně nabité. Před prvním použitím nabijte baterie pomocí nabíjecího kabelu C-USB po dobu nejméně 1,5 hodiny.

4. Návod k obsluze:

- Stiskněte vypínač na obou ovládacích jednotkách, aby se zapnuly. Počkejte několik sekund, než se obě jednotky synchronizují.
- Stiskněte tlačítko napájení na ovládací jednotce, aby se zapnuly regenerační návleky.
- Jakmile je zařízení zapnuté, vyberte požadovanou úroveň tlaku pomocí tlačítka napájení, stiskněte jej jednou pro zvýšení tlaku, počkejte sekundu a poté stiskněte znovu pro další zvýšení tlaku a tak dále. Začněte s nejnižším nastavením tlaku a podle potřeby jej postupně zvyšujte.
- Regenerační návleky se začnou nafukovat vzduchem a vytvářejí kompresní vzor, který se pohybuje od spodní části nohou k horní části.
- Návleky mají 3 masážní režimy. Mezi nimi můžete přepínat dvojitým stisknutím tlačítka napájení. Režim 1 je režim pro zmírnění únavy, který naplní návlek od prstů po stehna a poté uvolní tlak. Režim 2 je masážní režim, který nafoukne 2 komory a cirkuluje pohyb po celém návleku. Režim 3 je režim hloubkové péče, který je kombinací režimů 1 a 2.
- Uvolněte se a užíjte si jemnou kompresi. Regenerace nohou můžete používat po doporučenou dobu 15 až 30 minut na jednu sezení. Jedno sezení trvá 15 minut, poté se návleky automaticky vypnou.
- Po dokončení sezení stiskněte tlačítko napájení, aby se návleky vypnuly.

5. Údržba a čištění:

- Po každém použití vždy vypněte spínač ovládací jednotky.
- Nohavice a ovládací jednotku otřete měkkým, vlhkým hadříkem, aby zůstaly čisté. Nepoužívejte agresivní chemikálie ani rozpouštědla.
- Nevystavujte regenerační návleky přímému slunečnímu záření ani extrémním teplotám.
- Pokud regenerační návleky nepoužíváte, uložte je na chladném a suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte návleky, zda nevykazují známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli problémy, přestaňte je používat a kontaktujte výrobce.

6. Řešení problémů:

Problém: Řídicí jednotka se nezapíná.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně připojeny k řídicí jednotce a zda jsou plně nabité.
- Zkuste připojit druhou sadu baterií.

Problém: Návleky na nohy se nenaftukují rovnoměrně.

- Nechte návleky a jednotky absolvovat alespoň 1–2 úplné cykly, aby se synchronizovaly úrovně tlaku.
- Ujistěte se, že jsou návleky na nohy správně umístěny a nastaveny tak, aby dobře seděly.
- Zkontrolujte, zda v hadicích nejsou překážky nebo zalomení, které by mohly bránit proudění vzduchu.
- Pokud narazíte na jakékoli další problémy nebo máte obavy ohledně výkonu produktu, podívejte se do části o záruce nebo se obraťte na zákaznickou podporu.

7. Technické specifikace & záruka:

- Vstup: 4 speciální baterie dodávané se systémem
- Jmenovitý výkon: 25 W
- Jmenovité napětí: 7,4 V
- Kapacita baterie: 800 mAh
- Úroveň tlaku: nastavitelné v rozmezí 80 až 150 mmHg
- Doporučené použití: 15 až 30 minut na jednu sezení
- Automatické vypnutí: po 15 minutách nepřetržitého používání
- Na regenerační boty Aerify Alphas se vztahuje 24měsíční záruka pro spotřebitele v souladu s předpisy EU.



8. Kontaktní informace:

- Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo potřebujete pomoc, můžete se obrátit na zákaznickou podporu společnosti Aerify Recovery na:
- Webové stránky: <https://www.rehabilitacnipomucky.cz/aerify/>
- E-mail: info@rehasport.cz
- Nezapomeňte se poradit se svým lékařem, pokud máte nějaké zdravotní potíže nebo obavy ohledně používání tohoto produktu pro regeneraci. Užijte si své regenerační boty Aerify Alphas a zažijte rychlejší a efektivnější regeneraci po tréninku nebo fyzické aktivitě!

