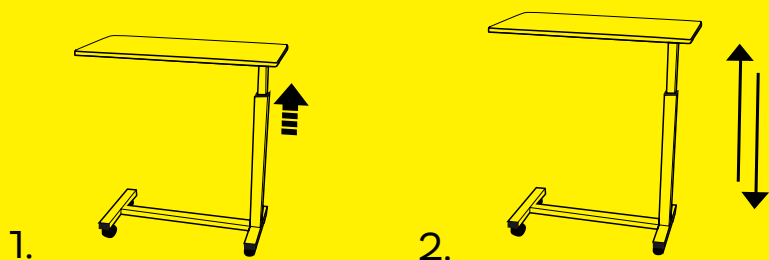


NASTAVENÍ VÝŠKY STOLKU

Povolte aretační kolečko (1) mírným tlakem posuňte do požadované polohy (2). Poté kolečko opět utáhněte.

**ÚDRŽBA**

Pro zachování maximální stability a správné funkce se doporučuje pravidelná kontrola stavu všech koleček, bezpečnostních a aretačních pojistek. V případě znečištění můžete omýt běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky bez obsahu rozpouštědel.

SERVIS A OPRAVY

V případě potřeby odstranění závady, provedení servisu nebo pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce.

PARAMETRY

Výška: 75 – 117 cm
Rozměr podstavce: 61,5 x 40 cm
Rozměr desky stolu: 77 x 38 x 1,7 cm
Průměr koleček: 5 cm
Hmotnost: 8,4 kg
Nosnost: 15 kg

NÁVOD K POUŽITÍ

STOLEK K LŮŽKU S KOLEČKY

pevný hliníkový rám


4 otočná kolečka pro
snadnou manipulaci

upravitelná výška
v rozmezí 75 – 117 cm

aretační kolečko

deska stolu 77 x 38 x 1,7 cm

nosnost 15 kg

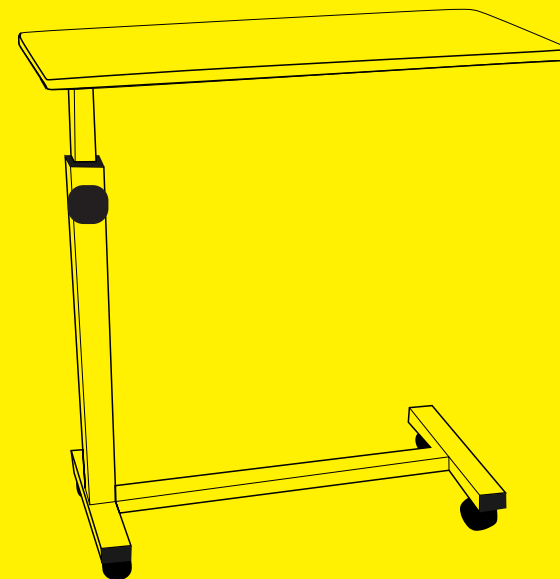

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Před použitím si pozorně přečtete tento návod k použití. Návod uschovejte k pozdějšímu nahlédnutí. Vhodnost a nastavení výšky stolu konzultujte s ošetřujícím lékařem. Nepřekračujte maximální nosnost 15 kg. Při sestavování stolu postupujte opatrně, abyste se vyvarovali zachycení nebo úrazu rukou či prstů. Při použití musí být všechny kolečka v kontaktu s podlahou. Před každým použitím zkontrolujte funkci všech koleček, bezpečnostních a aretačních pojistek. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele. Stolky k lůžku nejsou navrženy na vysokou nosnost. Uživatelé se o ně nesmí opírat ani je používat jako podporu při vstávání nebo sezení.

POUŽITÍ


Stolek k lůžku je kompenzační pomůcka, která je určena především pro osoby se sníženou mobilitou. Stolek je doplněk usnadňující péči o pacienty upoutané na lůžko. Konstrukce stolku na jedné noze a s kolečky zajišťuje snadnou manipulaci a tím umožňuje zvýšenou soběstačnost pacienta.

POPIS

Rám stolku je vyroben z hliníkových trubek s povrchovou úpravou. Spodní část rámu je vybavena 4 plně otočnými kolečky. Kolečka jsou vybaveny aretační brzdou pro bezpečnost použití. Deska stolku je výškově nastavitelná pomocí aretačního kolečka. Tvar konstrukce stolku umožňuje umístit stolek přímo nad postel.

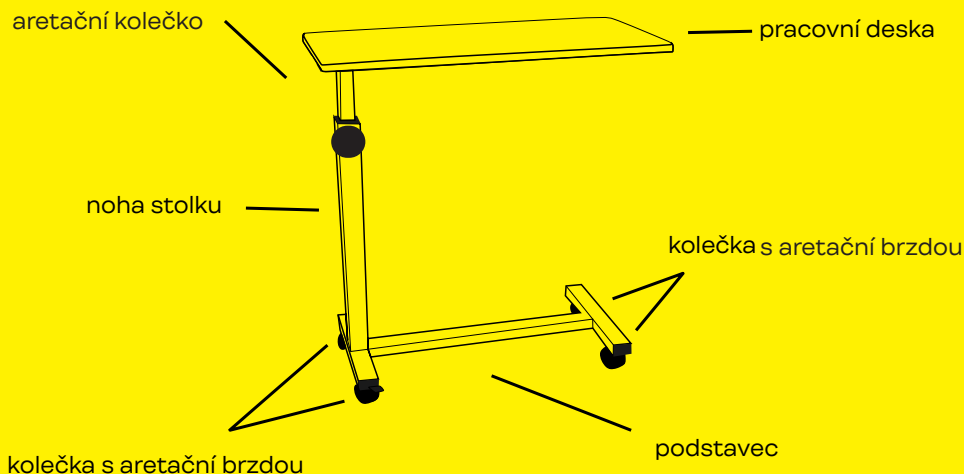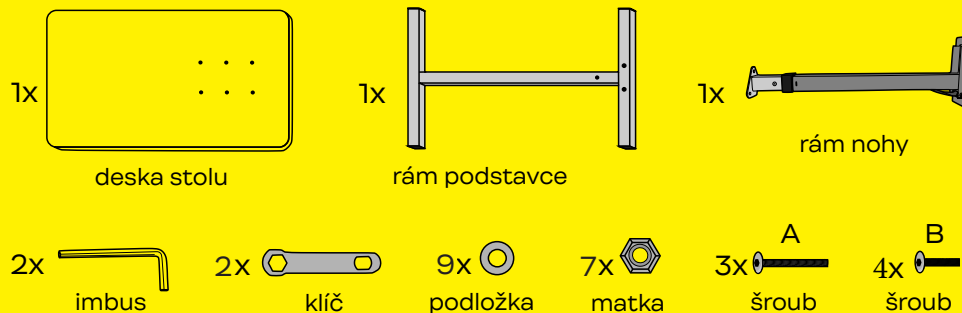**OBSAH BALENÍ****SESTAVENÍ STOLKU**

Příšroubujte kolečka k podstavci. Otočte rám podstavce zpět tak, aby kolečka byla směrem dolů. Přiložte rám nohy tak, aby otvory na trojúhelníkovém podstavci nohy korespondovali s otvory na rámu podstavce (1). Zasuňte dlouhé šrouby (A) do podložky a do patřičného otvoru na rámu podstavce (2), pro zajištění použijte matku ze spodní strany rám podstavce (3), utáhněte pomocí imbusu (4). Zasuňte tři dlouhé šrouby do podložky.

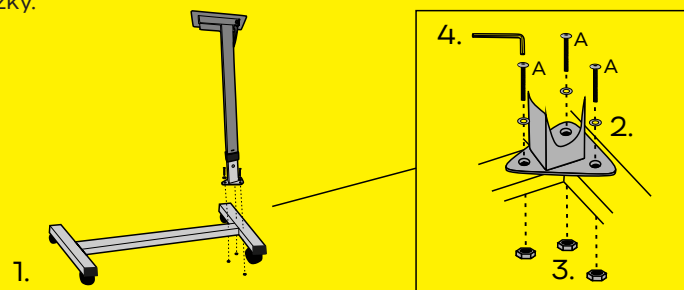

Příšroubujte desku stolu. Pevně příšroubujte desku stolu na rám nohy pomocí 4 šroubů (B), dotáhněte imbusem.

