

TheraGun G2PRO

- **Země původu:** USA
- **Výrobce:** TheraGun, LLC
- **Typ:** rázová terapie, masážní přístroj
- **Kód produktu:** G2PRO-EU
- **Balení:** G2PRO, nabíječka, 4x nástavec, 2x baterie



CZ

- **VAROVÁNÍ:** Během používání přístroje G2PRO™ nedávejte prst nebo žádné jiné předměty do blízkosti kovového pístu nad masážním nástavcem.
Nepoužívejte žádné jiné masážní nástavce ani jiné baterie než ty, které dodává společnost TheraGun a používejte je pouze podle návodu k produktu TheraGun.
Nepoužívejte přístroj G2PRO™ na hlavě nebo v blízkosti Vašich genitálií. Dávejte pozor na zamotání vlasů do držáku nástavce nebo jiných pohyblivých částí přístroje G2PRO™. Nepoužívejte přístroj G2PRO™ přes ohryzek nebo krční obratel C4.
Dávejte pozor, aby přístroj G2PRO™ nebyl mokrá a čistěte jej čistící houbičkou nebo lehce navlhčeným hadříkem.
Neblokujte větrací otvory motoru.
Abyste zvýšili životnost baterie, vyjměte ji z nabíječky, jakmile se na LED displeji přístroje TheraGun objeví zelená kontrolka.
- **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE THERAGUN G2PRO™ NEBO NABITÍM LITHIUM-IONTOVÉ BATERIE SI, PROSÍM, PŘEČTĚTE,** všechny návody a bezpečnostní pokyny v tomto manuálu, na nabíječce, na baterii a na samotném přístroji G2PRO™.
- **NOVÉ BATERIE MUSÍ BÝT NABITY PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:** Usilujeme o to, aby přístroj TheraGun G2PRO™ byl co nejbezpečnější. Jedná se však o moderní mechanický přístroj s elektrickými součástkami. Pokud není přístroj TheraGun G2PRO™ a jeho příslušenství řádně používán a udržován, hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Při používání přístroje TheraGun G2PRO™ je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, a to:
 1. **POUŽÍVEJTE JEN PODLE NÁVODU.** Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto provozním manuálu přístroje TheraGun. Používejte TheraGun pouze s doporučeným příslušenstvím a náhradními díly. Neprovádějte žádnou jinou údržbu, která není uvedena v tomto provozním manuálu nebo stanovená společností TheraGun.
 2. **NEVHODNÉ PRO DĚTI.** Přístroj TheraGun G2PRO™ a nabíječka nejsou určeny pro použití malými dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud není jeho používání pod vedením a dohledem odpovědné osoby, která zajistí bezpečné nabíjení a používání přístroje TheraGun G2PRO™. Nedovolte, aby byl přístroj TheraGun G2PRO™ používán jako hračka. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud přístroj používáte v přítomnosti dětí, nebo když jej děti používají. Děti by měly být pod dohledem, abyste se ujistili, že si nebudou hrát s přístrojem TheraGun G2PRO™ nebo s nabíječkou.

- **NIKDY NEVYNDAVEJTE BATERII, POKUD JE PŘÍSTROJ V PROVOZU:** 1. **UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ZRANĚNÍ, NABÍJEJTE LITHIUMTECH BATERIE POUZE V NABÍJEČKÁCH SPOLEČNOSTI THERAGUN.** Jiné typy nabíječek mohou způsobit zranění nebo poškození. Nedávejte baterii do napájecí zástrčky nebo zapalovače cigaret. Baterie se mohou trvale zničit nebo poškodit.
- 2. **POUŽÍVEJTE THERAGUN G2PRO™** pouze s bateriemi společnosti THERAGUN. Použití s jinými bateriemi může vést k nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- 3. **NABÍJECÍ MÍSTO.** Přístroj TheraGun by měl být nabíjen pod střešou v dobře větraném a suchém prostředí. Přístroj TheraGun G2PRO™ nenabíjejte venku, v koupelně nebo do vzdálenosti 3 metrů od vany nebo bazénu. Nepoužívejte přístroj TheraGun G2PRO™ nebo nabíječku na mokrém povrchu a nevystavujte nabíječku vlhkosti, dešti ani sněhu. Nepoužívejte baterii ani nabíječku v přítomnosti výbušného prostředí (plynné výpary, prach nebo hořlavé materiály), protože mohou vytvořit jiskry, které by mohly způsobit požár.
- 4. **UKONČENÍ NABÍJENÍ.** Po ukončení nabíjení vytahujte nabíječku za zástrčku, nikoliv za kabel, abyste snížili riziko poškození elektrické zástrčky a kabelu. Nikdy nepřenášejte nabíječku pomocí kabelu. Chraňte kabel před teplem, olejem a ostrými hranami. Nepoužívejte a nenabíjejte, když je kabel poškozen. Neroztahujte kabel nabíječky a nevystavujte jej tlaku. Umísťujte kabel mimo vyhřívané plochy. Nemanipulujte s nabíječkou, včetně koncovky nabíječky nebo s přístrojem TheraGun G2PRO™, pokud máte vlhké ruce.
- 5. **NABÍJEČKU VYTÁHNĚTE,** pokud ji nepoužíváte a vyjměte baterii. Odpojte nabíječku ze zásuvky, pokud ji delší dobu nepoužíváte. Ujistěte se, že kabel nabíječky je umístěn tak, aby se nepohnul, nezapadl ani nebyl vystaven poškození nebo tlaku. Poškozenou nabíječku okamžitě vyměňte.
- 6. **NEPŘEBÍJEJTE BATERII.** Nenechávejte baterii v nabíječce déle než hodinu po úplném nabití akumulátoru. Přebití baterie zkracuje její životnost nebo ji poškozuje.
- 7. **NEBLOKUJTE VĚTRACÍ OTVORY MOTORU.** Nevkládejte do větracích otvorů žádné překážky. Přístroj nepoužívejte, aniž by byl blokován kterýkoliv větrací otvor; chraňte před prachem, bavlněnými vlákny, vlasy nebo čímkoliv co může snížit proudění vzduchu. Udržujte vlasy, volné oblečení a prsty z dosahu větracích otvorů a pohyblivých částí, stejně jako nástavce.
- 8. **NIKDY NEZAPALUJTE BATERII.** Baterie může explodovat a způsobit zranění nebo poškození. Při spálení akumulátoru vznikají toxické výpary a látky.
- 9. **NEROZMAČKÁVEJTE, NEHÁZEJTE NEBO NENIČTE BATERII.** Nepoužívejte baterii nebo nabíječku, která byla vystavena prudkému úderu, spadla, byla přejeta nebo byla jinak poškozena.
- 10. **CHEMIKÁLIE Z BATERIÍ ZPŮSOBUJÍ VÁŽNÉ POPÁLENINY.** Vyvarujte se kontaktu s pokožkou, očima nebo ústy. Pokud z poškozené baterie vytékají chemikálie, použijte k manipulaci s ní gumové nebo neoprénové rukavice. Pokud je pokožka vystavena tekutinám z baterie, umyjte ji mýdlem a vodou a opláchněte octem. Pokud jsou bateriovým chemikáliím vystaveny oči, okamžitě je vyplachujte vodou po dobu 20 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv odstraňte a zlikvidujte jej.
- 11. **NEZKRATUJTE.** Baterie zkratuje, pokud kovový předmět spojí kladný a záporný pól na baterii. Neumisťujte baterii v blízkosti objektů, které by mohly způsobit zkrat, jako jsou mince, klíče nebo hřebíky v kapse. Zkratovaná baterie může způsobit požár a zranění.
- 12. **ULOŽTE BATERII A NABÍJEČKU** na chladném, suchém místě. Neskladujte baterii tam, kde mohou teploty překračovat 40°C – na přímém slunci, v autě, železných budovách v létě. Pokud není přístroj po delší dobu používán, měla by být z něj vyjmuta baterie.
- 13. **LIKVIDACE BATERIÍ THERAGUN.** Lithium-ion baterie TheraGun jsou šetrnější k životnímu prostředí než jiné typy baterií (např. niki-kadmium). Baterii vždy likvidujte podle federálních, státních a místních zákonů. Ohledně recyklačních míst se obraťte na recyklační agenturu ve Vašem okolí. Dokonce i vybité baterie obsahují určitou energii. Před likvidací použijte elektrickou pásku k zakrytí pólů, aby nedošlo ke zkratu baterie, což by mohlo způsobit požár nebo výbuch.

14. MONTÁŽ NABÍJEČKY NA ZEDĚ. Při montáži nabíječky na zeď použijte vhodný montážní materiál pro typ Vaší stěny a ujistěte se, že je dokovací stanice pevně připevněna. Zajistěte, aby bezprostředně za montážní oblastí nebyly umístěny žádná potrubí (plyn, voda, vzduch) nebo elektrické kabely, vodiče nebo potrubí. Dokovací stanice musí být namontována v souladu se směrnicemi, předpisy a normami (federální, státní a místní zákony platné v USA). Společnost TheraGun doporučuje dle potřeby používat ochranné oblečení, brýle a materiály.

15. NEROZEBÍREJTE. Demontáž nebo nesprávné opětovné sestavení mohou vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vystavení chemikáliím v bateriích. Záruka je neplatná, pokud byl přístroj TheraGun G2PRO™ rozebrán, stejně jako jeho baterie nebo nabíječka nebo z něj byly odstraněny některé součásti. Pokud je přístroj G2PRO™ poškozen, stejně jako jeho součásti, kontaktujte společnost TheraGun.

16. SERVIS. Pokud přístroj TheraGun G2PRO™, baterie nebo nabíječka nepracují správně, pokud došlo k ostrému nárazu nebo k pádu, poškození, ponechání venku nebo pádu do vody, přístroj a příslušenství nepoužívejte a kontaktujte společnost TheraGun zasláním e-mailu na info@theragun.com ohledně opravy nebo servisu. Přístroj TheraGun G2PRO™ se nepokoušejte opravit nebo demontovat, protože může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

- **OMEZENÁ ZÁRUKA:** Produkt TheraGun G2PRO™ má omezenou záruku na dva roky. Aby mohl být produkt G2PRO™ nebo jeho část opraven nebo vyměněn v rámci záruky, musí být společnosti TheraGun vrácen předplacenou a pojištěnou zásilkou. Tato záruka se nevztahuje na poškození, které společnost TheraGun považuje za opravy provedené jinou osobou než oprávněným pracovníkem společnosti TheraGun, dále se záruka nevztahuje na nesprávné použití, změny, nevhodné použití, běžné opotřebení, nedostatečnou údržbu nebo nehody. Podrobné informace o záruce najdete na www.theragun.com/warranty. V případě jakýchkoli záležitostí týkajících se záruky kontaktujte, prosím, e-mailem na info@theragun.com či info@rehasport.cz



- **ULOŽTE VŠECHNY POKYNY PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ: BEZPEČNOST**
 - Nikdy se nepokoušejte rozebírat baterii.
 - Nikdy neskladujte baterii na přímém slunci nebo při teplotách nad 40 °C.
 - Nikdy nevystavujte baterii nebo nabíječku vodě.
 - Baterie a nabíječka fungují nejlépe při normální pokojové teplotě. Nenabíjejte na přímém slunečním světle ani při nízkých teplotách. Rozsah teplot pro nabíjení je 0 °C až 40 °C.
 - Při dlouhodobém skladování by měla být baterie plně nabitá.
 - Vždy vyjměte baterii z nabíječky, když kontrolka svítí zeleně.

Zadní boční pohled

Tlačítko otáčení ramene

Tlačítko zapínání/vypínání

Polohy otáčení ramene

Odnímatelný masážní nástavec

Motor s vysokým točivým momentem

Větrací otvory motoru

LED displej stavu kapacity baterie

Úchop pro uvolnění baterie

- **Spouštění přístroje G2PRO™: BEZPEČNOST**
 1. Jakmile je baterie správně vložena, posuňte tlačítko zapínání dopředu, abyste přístroj G2PRO™ spustili.
 2. Posuňte tlačítko zapínání dozadu, abyste přístroj G2PRO™ vypnuli.

Přípevnění masážního nástavce:

1. K upevnění masážního nástavce: nasměrujte nástavec ke konci přístroje G2PRO™.
2. K odejmutí masážního nástavce jej jednoduše vytáhněte.

Nastavení ramena nesoucího masážní nástavce:

1. Podržte černé tlačítko naproti logu G.
2. Během držení tlačítka otočte rameno na pozici 1 až 4. Označení pozic se nachází na straně.
3. Jakmile uslyšíte zamknutí zámku ramene, můžete uvolnit černé tlačítko.

Baterie:

1. K uvolnění baterie stiskněte černé úchopy na obou stranách a poté ji vytáhněte.
 2. Baterii vkládejte s logem G na špičce trojúhelníku.
- LED kontrolky při vkládání baterie jednou bliknou, aby ukázaly, že je baterie správně vložena.
- Jakmile je přístroj G2PRO™ zapnut, ukáží LED kontrolky úroveň nabití baterie. Po 5 sekundách kontrolky zhasnou.
 - Nabíjejte baterii pouze tehdy, svítí-li pouze jedna LED kontrolka

LED displej stavu nabití baterie:

Provozní doba při plném nabití činí přibližně 45 minut.

Plně nabito

Částečně nabito

Brzy nabít

NABÍJENÍ:

1. Zapojte nabíječku do zásuvky. Zelená THERAGUN-LED kontrolka třikrát blikne a pak přestane.
2. Vložte baterii do nabíječky a tlačte ji dolů, dokud nezacvakne. Pokud je do přístroje vložena správně, začne THERAGUN-LED kontrolka následně pomalu blikat (jednou za sekundu).
3. Jakmile THERAGUN-LED kontrolka svítí stále zeleně, je baterie plně nabitá.

- Pokud je baterie přehřátá, rozbitá nebo není správně vložena do přístroje, bude červená THERAGUN-LED kontrolka blikat rychle (třikrát za sekundu).
- Během nabíjení baterie bude kontrolka THERAGUN-LED blikat dále červeně, ale pomaleji (jednou za sekundu).
- Je-li baterie zcela nabitá, svítí kontrolka LED THERAGUN zeleně.

Spustil jsem svůj přístroj G2PRO™. Co teď?

Přiložte přístroj G2PRO™ k tělu a pohybujte jím po celém těle. Zvykněte si na pocit rázové terapie. Vyvíňte tlak, který je pro Vás pohodlný. Nechte přístroj udělat svou práci. Po jeho použití by Vás nemělo nic bolet.

Jak rychle mám pohybovat přístrojem G2PRO™?

Čím pomalejší pohyb tím lépe. Pohybujte jím přibližně 3 cm za sekundu. Při pohybu po Vašich svalch nespíchejte.

Jak hluboko do mých svalů mám tlačit přístroj G2PRO™?

Nejlepším postupem je spustit přístroj G2PRO™ před aplikací na tělo. Jakmile je přístroj v provozu, přiložte masážní nástavec na Vaše tělo a nechte přístroj G2PRO™ působit na Vaši tkáň. Jakmile pocítíte tlak, který si přejete, můžete jej pomalu zvyšovat, dokud nedosáhnete pohodlného vyvážení.

Jak často mám přístroj používat?

Doporučujeme 15 minutovou masážní dávku pro celé tělo. Nebojte se použít na Vaše extra bolavé svaly po dobu dalších 30-60 sekund během dne.

Jak často mám vyměňovat své masážní nástavce?

V průměru by měly být masážní nástavce vyměněny každých 90 dní. Při použití na klinikách, kde bude Vaše průměrné denní použití určitě vyšší, doporučujeme vyměňovat přibližně po 30 dnech použití.

Jak dlouho vydrží baterie?

Baterie vydrží přibližně 45 minut v závislosti na síle použitého tlaku.

Pokud potřebuji více informací, co bych měl udělat?

Navštivte nás online na adrese www.rehabilitacnipomucky.cz/videonavody/.

PÉČE A ÚDRŽBA

Nabíječku baterií vyčistěte jemným suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.

SPECIFIKACE

Produkty jsou navrženy pouze pro nabíjení znovu nabíjecích baterií typu LithiumTech TG2-BATT-20S (2.0Ah).

Vhodné baterie jsou:

10.8V baterie pro nabíječku TG-FC-30 (3.0A), VÝSTUP NAPĚTÍ 10.8V. Tyto modely mají stejné elektrické a mechanické konstrukce s výjimkou odlišného napětí výstupu. Napájecí zdroj pro nabíječku: 100V-240V, 55W. Frekvence: 50-60 Hz.

Distributor:**REHASPORT TRADE s.r.o.****www.rehasport.cz, Tel: 800 200 900**